

## ハイゼット・ディアスワゴン 車いす乗車の手順

①車のサイドブレーキがかかっていることを確認します。

②バックドアを開けます。(図1)



(図1)

③スロープのノブを引き、ロックを解除します。  
(図2)



(図2)

③スロープの取手を持ち、引き出しながらゆっくり  
降ろします。(図3)  
※少し重いので注意してください。



(図3)

④車いすを図のようにスロープの正面に運び、車い  
すのブレーキをかけます。(図4)



(図4)

- ⑤ウインチボタンのスイッチを押します。(図5)  
(オレンジ色に点灯します)



(図5)

- ⑥リモコンを取り出し電源を押します。(図6)  
(左上部分が点灯します)



(図6)

- ⑦上ボタンを押して、ブザーが鳴ったら離します。  
(ベルトのロックが解除されます)



(図7)

- ⑧灰色のベルト (ウインチベルト) と赤色のベルト (固定ベルト) のフックを外して、片方ずつ灰色のベルトを引き出します。



⑨灰色のベルト（ウインチベルト）のフックを車いすの前輪部のフレームに引っかけます。図のようにパイプが2本並んだ部分にかけます。（図9）

⑩車いすのブレーキを解除し、乗車します。

⑪もう一度リモコンの電源を入れて、上ボタンを押すと灰色のベルトが巻き取られます。（図7）  
車いすのハンドルはしっかりとつかみ、まっすぐに進むよう注意してください。

※スイッチを離すと巻き取りは止まります。

⑫車いすのタイヤの中心部を黄色の線に合わせて止めます。（図11）

⑬赤色のベルト（固定ベルト）のフックを車いすの後部に引っかけます。  
（図9のようにパイプの交差部分にかけてください）

(図8)



(図9)



(図10)



(図11)



(図12)

⑭赤色のベルト（固定ベルト）を輪に通して、たるまないように引っ張ります。（図13）  
左右のベルトの長さが同じになるよう調整して固定してください。



（図13）

⑭もう一度リモコンの電源を入れ、上ボタンを押して、灰色のベルト（ウインチベルト）をしめて車いすが動かないようしっかり固定します。（図14）



（図14）

⑮車いすの左右のブレーキをかけ、リモコンを元の位置へ戻します。（図15）



（図15）

⑯車いすのアームレストの下を通してシートベルトを締めてください。（図16）



(図16)

⑰左側も同様にアームレストの下を通して、シートベルトを装着します。(図17)



(図17)

⑰スロープを収納し、バックドアを閉めます。



以上で、乗車の手順は完了です。

## 降車の手順

①サイドブレーキがかかっていることを確認します。

②バックドアを開け、ノブを引き上げます。(図13)



(図13)

③スロープの取手を持ち、引き出しながらゆっくり降ろします。(図14)



(図14)

④車いす使用者のシートベルトを外します。外した、シートベルトは、右側のフックにかけてください。



(図15)

⑤赤色のベルト（固定ベルト）の根元のレバーを押し、ベルトをゆるめフックを車いすから取り外します。(図16)



(図16)

⑥降りるときに引っかからないようベルトはまっすぐに並べてください。(図17)



(図17)

⑦車いすのブレーキを解除し、降車します。  
⑧リモコンの電源を入れ、リモコンを持ち下ボタンを押しながら、車いすのハンドルをしっかりと握り  
ゆっくりとスロープを降ります。(図18)



(図18)

⑨下まで降りたら車いすのブレーキをかけます。

⑩車いすにかけてある灰色のベルト(ウインチベルト)のフックを片方ずつ外します。(図19)



(図19)

⑪灰色のベルト(ウインチベルト)のフックを車いすから外し、そのまま図のように赤色のベルト(固定ベルト)のフックにかけてください。(図20)



(図20)

⑫リモコンを元の位置に戻します。(図 2 1)



(図 2 1)

⑬スロープを収納してバックドアを閉めます。  
(図 2 2)



(図 2 2)

以上で、降車の手順は完了です。